


Tillykke med købet af FirstAED Beacon

Du har nu modtaget din nye Beacon til brug for din mobile hjertestarter.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at få aktiveret din Beacon.

1:

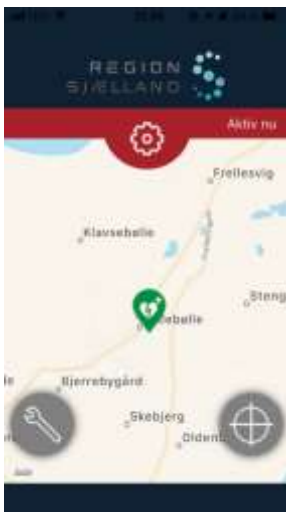

Åbn FirstAED app`en og gå ind i "Svensknøglen"

2:



Du ser nu dette billede.

Luk app`en ned, så den ikke kører i baggrunden.

OBS! Du skal ikke logge dig ud. Blot gå ud på "skrivebordet" og scrolle skærmen væk i baggrunden.

3:



Åbn FirstAED app`en igen.

Gå ind i "Svensknøglen" og på billedet er der nu kommet endnu et felt:



"Eksterne enheder"

Gå ind i "Eksterne enheder"

4:




Slå "Tillad scan for Eksterne Enheder" til



Din hjertestarter er vist med din adresse.

5:

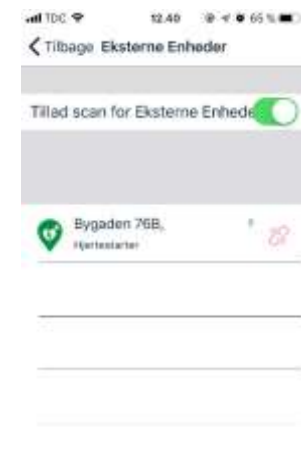

"Tillad scan for Eksterne Enheder" er nu slået til (grøn)



Clipsen er rød indtil forbindelsen er fundet.
Der kan godt gå nogle sekunder.


6:



Når clipsen er grøn, er der forbindelse mellem din beacon og din mobil.

OBS! Batteriet holder i 2 år, og batteritypen hedder CR2477 +3V

7:

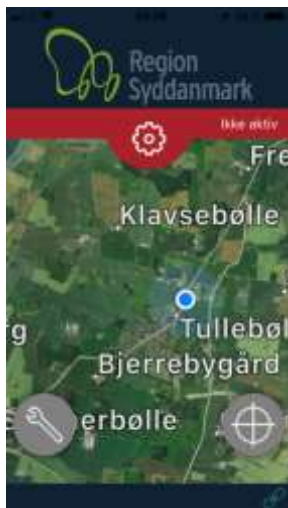

Når du går ind i app`en vises clipsen som et lille ikon nederst. Clipsen er grøn, når der er forbindelse.

Vi ønsker dig held og lykke med din nye Beacon

Med venlig hilsen

FirstAED